




Instruction de drainage | Réservoir drainova[®], Kit de drainage

Art. N° 2010 | drainage par aspiration douce




Remarque: les parties importantes du système sont en couleur dans l'instruction.
Veuillez également respecter les instructions d'utilisation détaillées et les avertissements qui y figurent.

- 1** | Ouvrez le set de pansement et disposez le matériel sur le champ stérile bleu.

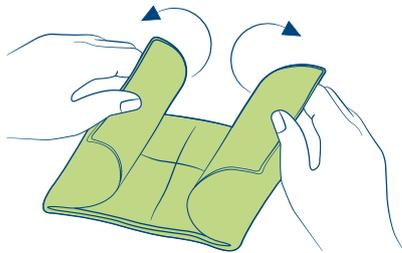


- 2** | Saisissez un gant par la partie retournée (poignet) et enflez-le, enflez ensuite le deuxième.

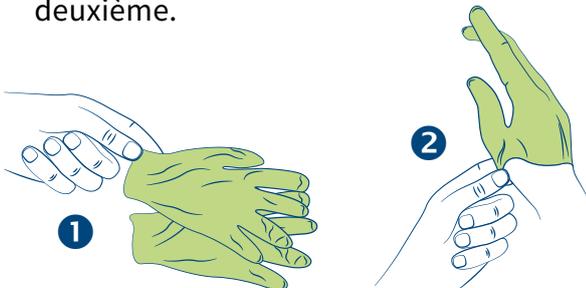


- 3** | Retirez le capuchon de valve ou le capuchon de protection en silicone délicatement et jetez-le.

Retirez le capuchon de protection en silicone drainova[®]

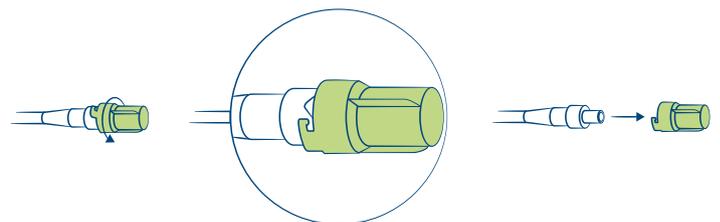


Retirez le capuchon de valve PleurX[™]


- 4** | Insérez la valve de sécurité du cathéter dans le sachet du tampon imbibé d'alcool et nettoyez-la durant 30 secondes.

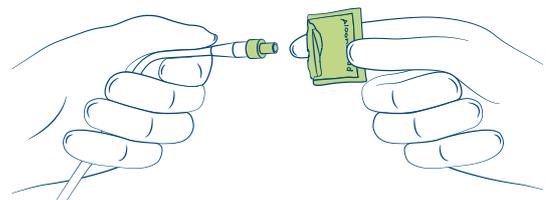

- 5 | 1 Retirez le réservoir de l'emballage et retirez le capuchon blanc.
2 Enforcez complètement l'adaptateur blanc de la ligne de raccordement sur l'embout spécifique du réservoir.

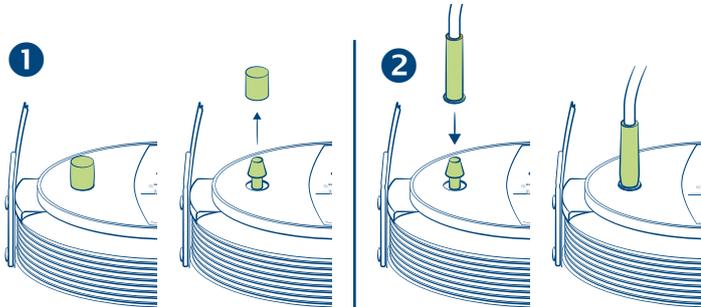

- 6 | Fermez le clamp de la ligne de raccordement.

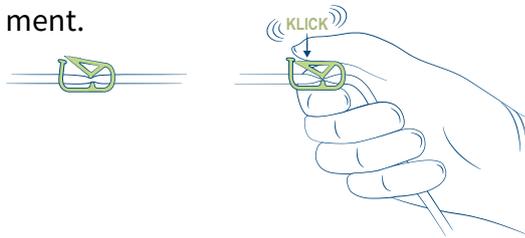


- 7 | Retirez la cape de protection de l'embout d'insertion spécifique, éventuellement en la faisant tourner légèrement.



- 8 | Insérez l'embout d'insertion spécifique dans la valve de sécurité du cathéter. Un claquement est audible et perceptible.




- 9 | 1 Pincez l'extrémité du réservoir.
2 Retirez la goupille orange.

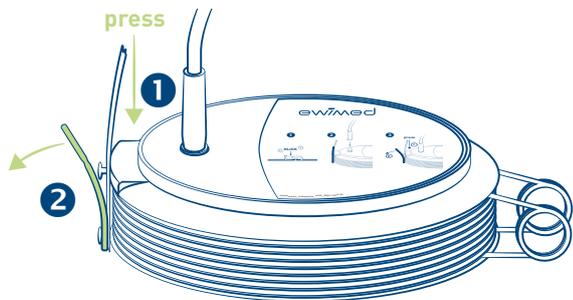


- 10 | Ouvrez le clamp de la ligne de raccordement. Le drainage commence.



- 11 | Après le drainage, refermez le clamp de la ligne de raccordement.

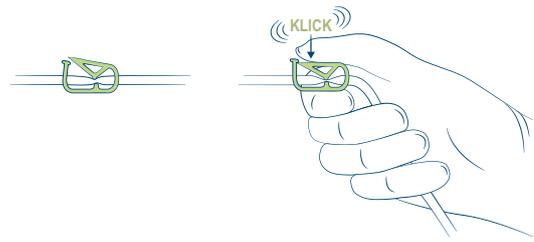


Remarque: Notez le volume de liquide drainé en lisant la quantité marquée par le curseur de l'échelle de quantification.

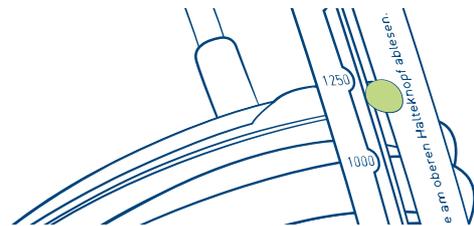

- 12 | Retirez l'embout d'insertion spécifique de la valve de sécurité du cathéter.




- 13 | Insérez la valve de sécurité du cathéter dans le sachet du tampon imbibé d'alcool et nettoyez-la durant 30 seconds.

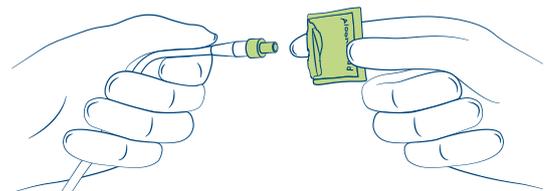

- 14 | Fermez la valve de sécurité du cathéter avec le capuchon de valve ou le capuchon de protection en silicone.

Fermez avec le capuchon de protection en silicone drainova®

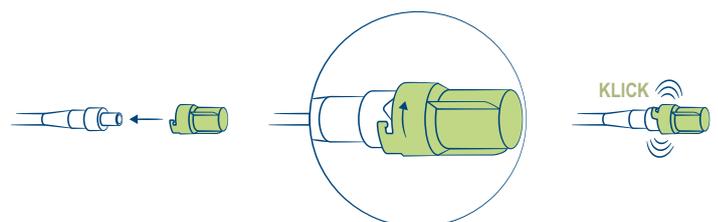

Fermez avec le capuchon de valve PleurX™